


NOAHCALI-100 SOFTWARE - PROGRAMA DE PC

1. Ingresar a la página: <https://es.locmedt.net/resource-center>

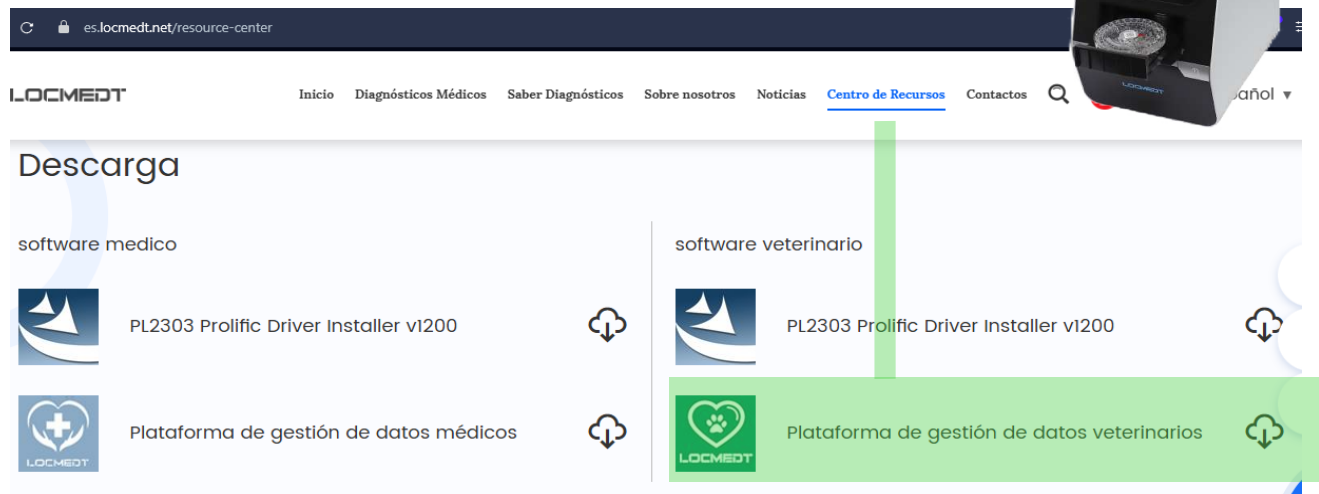

Descargar: **Plataforma de gestión de datos veterinarios**

2. Instalando el software:




2. 1 - Doble clic o bien Ejecutar:

LOCMEDT_Veterinary_DataManagement_Platform_setup.exe

2. 2 - Si sale Cartel de advertencia de instalación,
ir a la opción de **permitir ejecutar**


2. 3 - Poner idioma del instalador en Inglés

2. 4 - Elegir la carpeta donde se instalará

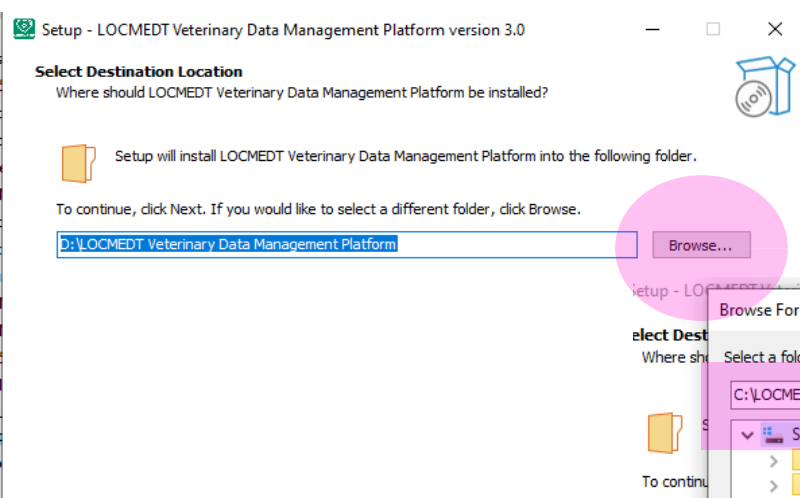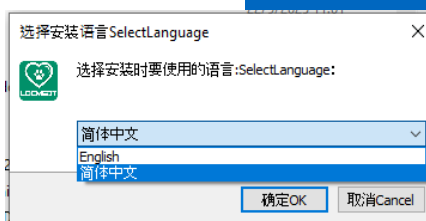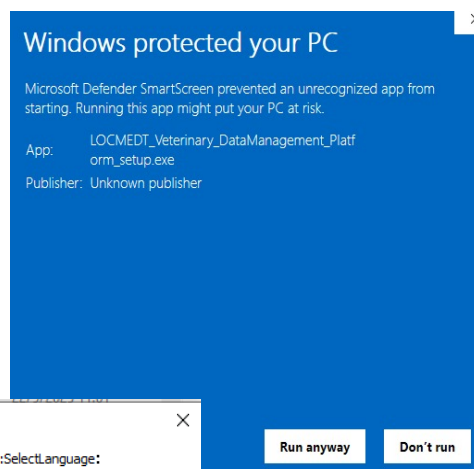

Click en **Browse...**

Luego en **C** o donde prefiera

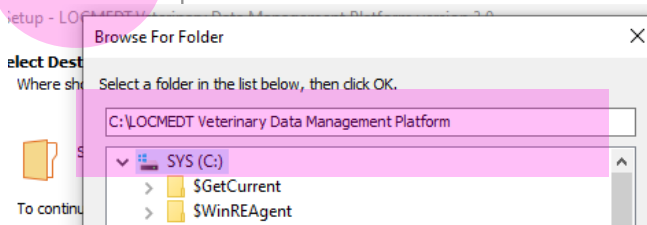

Select Additional Tasks

Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform with Management Platform, then click Next.

Additional shortcuts:


☒ Create a desktop shortcut

2. 5 - Tildar la opción

Create a desktop shortcut

2. 6 - Click en **Install** (abajo a la derecha)

2. 7 - Click en **Finish**

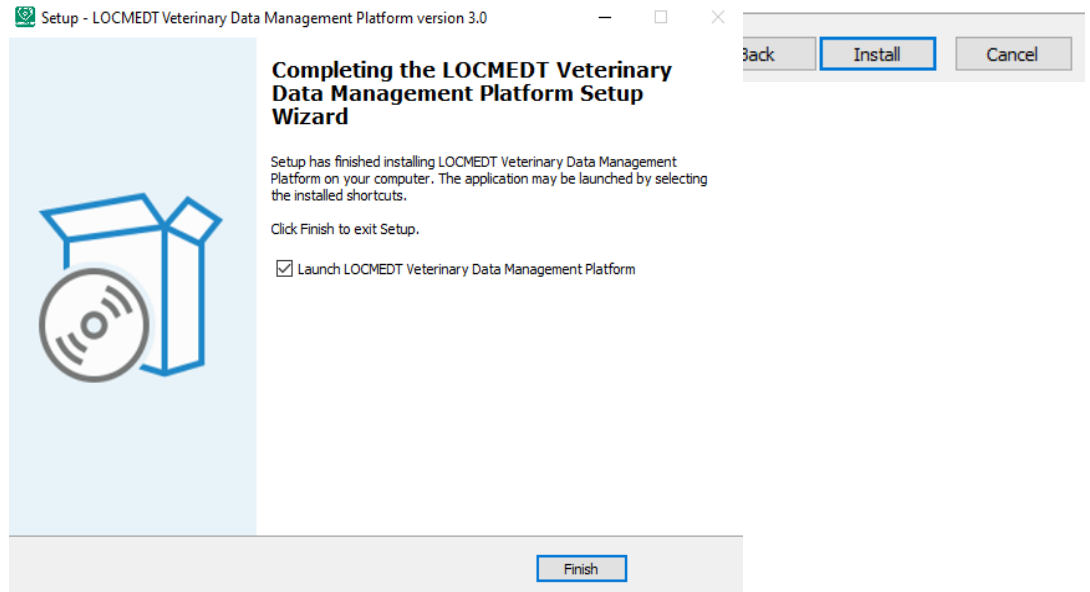


3 . Configurando la aplicación:

3. 1 - Si no abre inmediatamente luego del paso anterior
doble click al ícono del escritorio:




3. 2 - Cambiar el Idioma:

- Ir a Settings
- Language
- Español

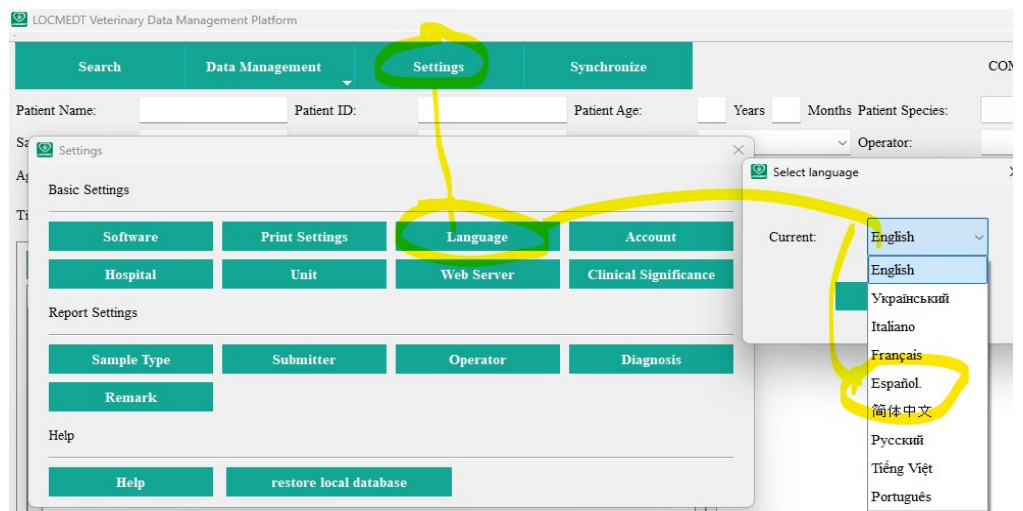

3. 3 - Configurar con el instrumento

- Ir a Ajustes
- Cuenta
- Ingresar el ID del dispositivo, es el mismo que el Número de Serie
- Ingresar la clave.

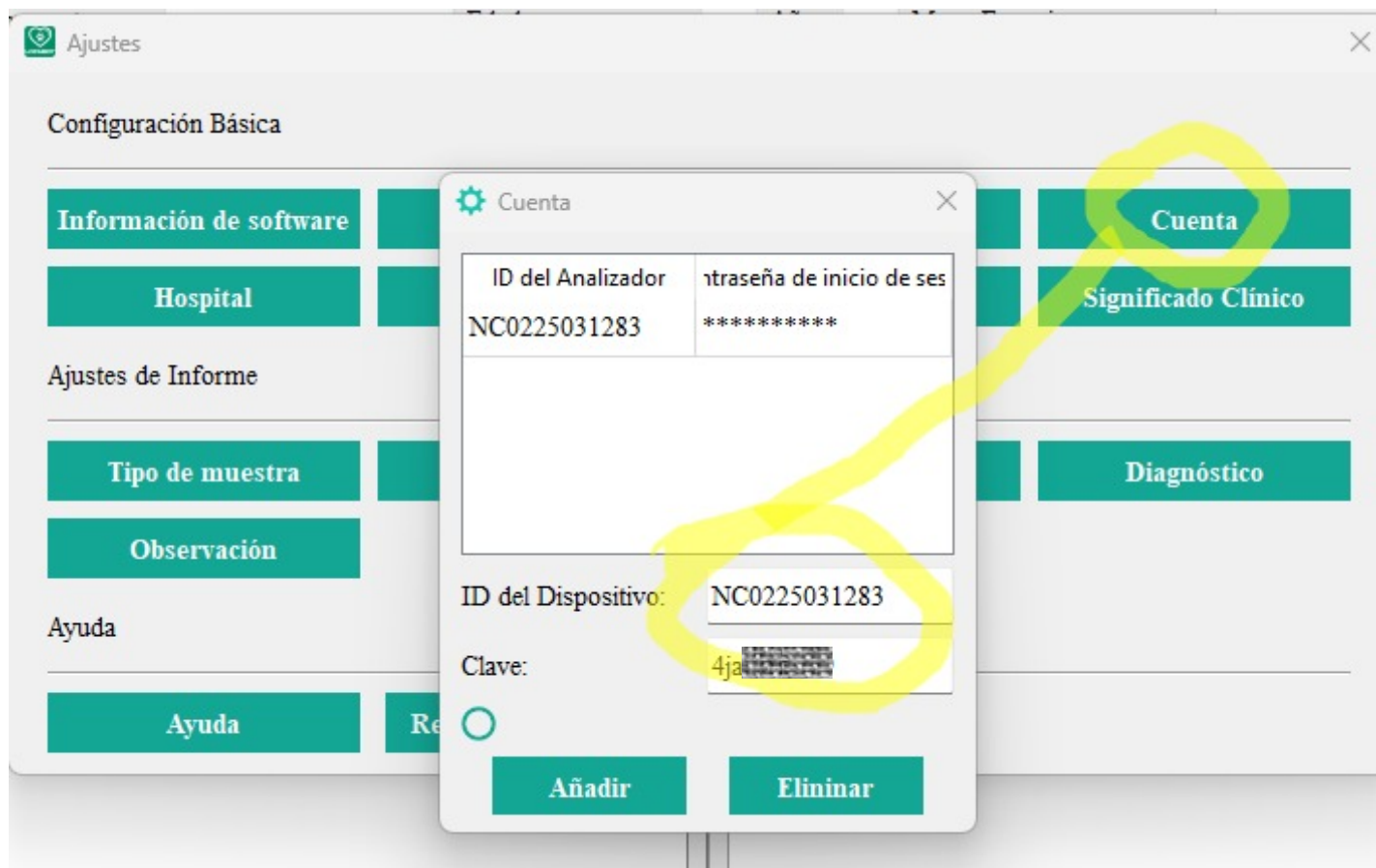

NOTA: A TENER EN CUENTA:

Para obtener el número de serie/ ID y la clave/contraseña del NOAHCALI-100 lea con su celular el código ubicado en la parte de atrás del equipo.

O bien solicítelo
a nuestro servicio técnico

stecnico@onyva.com.ar



4 . Personalización:

4. 1 - Personalizar los datos de la veterinaria

- a. Ir a Ajustes
- b. Hospital
- c. Ingresar los datos.

En la imagen se encuentran ejemplos:

4. 2 - Personalizar las unidades

- a. Ir a Ajustes
- b. Unidad
- c. Seleccionar Unidad Inglesa o bien la que prefiera

4. 3 - Personalizar la Impresión

- a. Ir a Ajustes
- b. IMPRESORA
- c. Seleccionar como la imagen: (o bien como prefiera)

Configuración Básica

Información de software

Hospital

Ajustes de Informe

Tipo de muestra

Observación

Ayuda

Hospital

Hospital: Veterinaria "ONYVA"

Dirección: Dickman 990

Tel: +54 11 5146 6977

Correo e: ventas@onyva.com.ar

Guardar

Ajustes

Configuración Básica

Impresora

Unidad

Cuenta

Significado Clínico

Diagnóstico

Ayuda

Restaurar la base de datos local

Unidad

☐ SI

☒ Unidad inglesa

☐ Otras unidades

Guardar

Informe de prueba bioquímica

Nombre: Especies Gato
Nombre del dueño: Género:
ID de mascota: Edad: Años
Serie de muestra: Tipo de muestra: Tiempo:

Química	Nombre completo	Resultado	Unidad	Rango de referencia
ALB	Albumin	33g/L		22-40
TP	Total protein	65g/L		48-78
GLOB	Globulin	32g/L		20-43
AG	AVG	1		
ALP	Alkaline phosphatase	200U/L		9-219
GGT	γ-Glutamyl-transferase	5U/L		1-11
ALT	Alanine aminotransferase	35U/L		15-111
AST	Aspartate aminotransferase	104U/L		10-30
AST/ALT		0.5		
TBL	Total bilirubin	1.3umol/L	↑	0-15
PHOS	Phosphorus	1.14mmol/L		0.84-2.42
UA	Uric acid	19umol/L		0-120
BUN	Blood urea nitrogen	5.2mmol/L		1.9-9.3
CRE	Creatinine	70umol/L		44-159
BUN/CRE		16.9		
AMY	Amylase	1072U/L		500-1900
CK	Creatine kinase	110U/L		20-200
LDH	Lactate dehydrogenase	108U/L		20-495
Ca	Calcium	2.7mmol/L		2.1-3.2
Ca/P	Ca/P	37mg/dL		
GLU	Glucose	5.4mmol/L		4.5-7.8
TC	Total cholesterol	8.3mmol/L	↑	2.8-7.5
TG	Triglycerides	3.5mmol/L	↑	0-1.65

Significado Clínico

Total bilirubin (TBL) Alto Hipertrigliceridemia canina alta, hemoconcentración en perros y gatos, anemia hemolítica causada por intoxicación con cebolla, etc. 2.Hepatitis canina infecciosa, leptospirosis, hepatitis bacteriana, cirrosis hepática, etc. 3. Enfermedad por obstrucción del conducto biliar, colestasis, etc.

Total cholesterol (TC) Alto 1. Hipotriodismo con hiperlipidemia 2. Diabetes con hiperlipidemia leve 3.Síndrome nefrótico 4. Pancreatitis aguda canina

Triglycerides (TG) Alto Los triglicéridos elevados son importantes para la aparición de enfermedades coronarias. Esfuerzo físico con alto contenido de grasas, respuesta al estrés, aterosclerosis, ictericia obstructiva, diabetes, anemia extrema, síndrome nefrótico, pancreatitis, hipofunción pancreática, inanición prolongada y niveles elevados después de una dieta rica en grasas.

4) Operador: 5) Remitente: 6) Hora de impresión: 2025/09/23 17:02

7) Diagnóstico: 8) Observación:

Nota: Debido a la complejidad y las características individuales del diagnóstico de enfermedades en registros médicos específicos, la interpretación de la importancia clínica es solo para referencia, no como una base unilateral para el diagnóstico de enfermedades específicas

9) Signo: 10) El resultado sólo es responsable de esta muestra

11) Tel: 12) Correo-e: 13) Dirección: LOCIMEDT

Seleccione entrada

☐ Gráfico ☒ Flecha

Seleccionar papel

☐ A5 Paisaje ☒ Imprimir A4

Opción

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Significado Clínico(A4)

☐ No mostrar ☒ anormal

☐ todo

Nota: Seleccionar la opción de su importancia clínica.

Seleccionar todo Alto Bajo

A/G Alto Bajo

AG Alto Bajo

ALT Alto Bajo

Formato de hora

☒ Sistema de 24 hora ☐ Sistema de 12 hora

Precisión

☐ Día ☐ Hora ☒ Minutos ☐ Segundos

Otros

Subir el logotipo (120 x 80)

Fuente de la escala 14 Vista previa

Guardar