


URIT


Guía rápida para el Analizador de orina veterinario



1 - PREPARACION

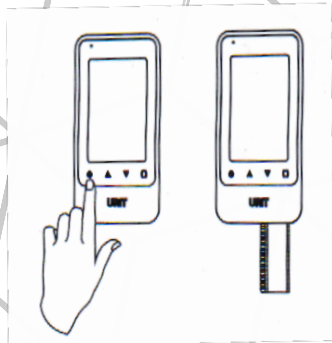

Prender el equipo y la impresora

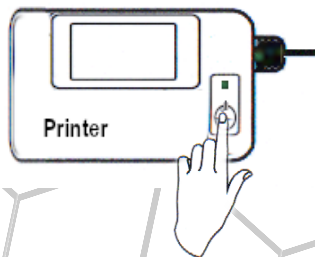


3 - PASE DE MUESTRA




Sumergir la tira por completo (90mm)
Durante no más de 2 segundos

Secar de costado el excedente sobre una servilleta

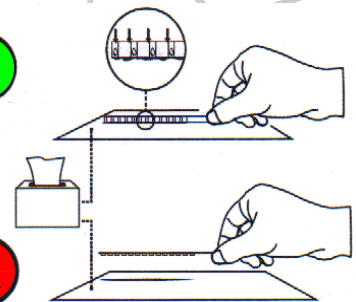


2 - CONTROL QC

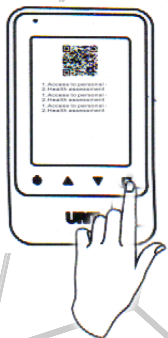

Seleccionar QC en el menú: Ajuste
Item: Tipo (especie)
luego Volver

Introducir la guía con el control QC en el equipo

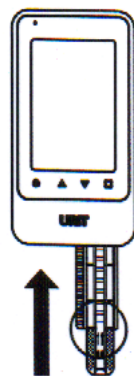


Comparar resultados con Cartilla QC




Seleccionar en Ajuste el Tipo: (especie).
Luego Volver

Colocar la tira en la guía plástica y luego ambos en el equipo

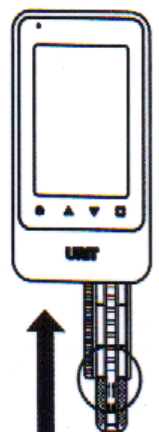


CARTILLA QC

Semi-Quant	SI	CONV
*Vc +3 5.6	mmol/L 100	mg/dL
LEU - 0	CELL/uL 0	leu/uL
MA 10	mg/L 1.0	mg/dL
*CR 26.4	mmol/L 300	mg/dL
KET - 0	mmol/L 0	mg/dL
URO - 0	Normal	Normal
BIL - 0	umol/L 0	mg/dL
GLU - 0	mmol/L 0	mg/dL
PRO - 0	g/L 0	mg/dL
SG 1.060		1.060
pH 5.0		5.0
BLD - 0	CELL/uL 0	mg/dL
*Ca 1.0	mmol/L 4.0	mg/dL
ACR Norm < 3.4	mg/mmol	< 30 mg/g
PCR Norm < 17.0	mg/mmol	< 150 mg/g

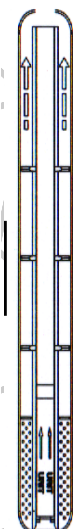

En 50 segundos muestra en pantalla resultados y los imprime.

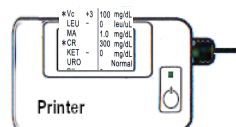

Al finalizar se deshecha la tira y se limpia la guía

